

移乗用具

ビージーボード

<https://www.vaice.world/>

取扱説明書

製品ラインアップ



スタンダード (汎用)
TAISコード
02030-000001



ロング (自動車用)
TAISコード
02030-000002



ショート (トイレ用)
TAISコード
02030-000003

ビージーボードをご購入いただきまして有難う御座います。
本製品を安全かつ確実にご使用いただき、本製品の機能を十分にご活用いただきたくため、ご試用前にこの取扱説明書を必ず良く読み、内容をご理解いただいた上でご使用ください。本説明書は大切に保管してください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。

取扱説明書

本製品のご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

- ・本取扱説明書では、製品を安全にご使用いただき、ご利用者さまや介護をされる方など周辺の方々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、さまざまな注意をしています。説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。
- ・お読みになられた後、本製品をご使用される方が常に見られる場所へ保管してください。

安全上の注意

警告 この警告を無視して、間違った取り扱いをすると、利用者または周辺の方などが死亡または重傷を負うことが想定されます。		
分解 禁止	分解や改造を行わない 商品が破損したり、怪我を負うおそれがあります。	
禁止	遊具として使用しない 転倒して、けがを負うおそれがあります。	本製品の上に立ち上がらない 転倒して、けがを負う恐れがあります。
	座位の保てない方は使用しない 転倒して、けがを負うおそれがあります。	浴槽内など水中で使用しない 滑って、けがを負うおそれがあります。
	体重が180kgを超える方は使用しない 本体が破損し、けがを負うおそれがあります。	本製品へ同時に2人以上乗らない 本体が破損し、けがを負うおそれがあります。
必ず 実行	車椅子を適切に配置する。	シートの軌道範囲の障害物を取り除く。
	車椅子のブレーキをロックする。	移乗先と移乗元と両方で、本製品をしっかり支える。
	車椅子と移乗先(元)との高さを調整する。	-

注意 この注意を無視して、間違った取り扱いをすると、利用者または周辺の方などが死亡または重傷を負うことが想定されます。		
禁止	座面のシートを持って本体を持ち上げない 本体が傾いて、本体を脱落させるおそれがあります。	移乗中に利用者から手を離さない 移乗を完了するまで、利用者の身体をしっかり支えてください。

使用方法

ビージーボードは、車椅子を利用される方などを含めた被介護者が移乗する際に、利用者の責任範囲でやむを得ない場合を除いて、介助者が被介護者の移乗を補助する目的で使用することを前提としています。

使用方法



1 車椅子とベッドの高さを調整します

2 車椅子に移乗しやすいように浅い椅子姿勢をとります

3 ビージーボードをおしりの下に差し込みます(1)



4 ビージーボードをおしりの下に差し込みます(2)

5 ビージーボードのシートの上に片側のおしりをしっかりと乗せます(おしりをシートの中心より少し後ろに配置します)

6 シートに乗ったおしりや側面に手を添えて移乗を開始します(動かしにくい時はシートに手を添えて直接動かします)




7 シートに乗ったおしりや側面に手を添えて移乗を開始します(動かしにくい時はシートに手を添えて直接動かします)

8 膝下を持ち上げてビージーボードを引き抜きます(移乗後に本用具をおしりの下から取り外すには、本用具のベース部を掴みながら、「大きく緩やかな」弧を描くように回転させてください)

9 膝下を持ち上げてビージーボードを引き抜きます

各部名称

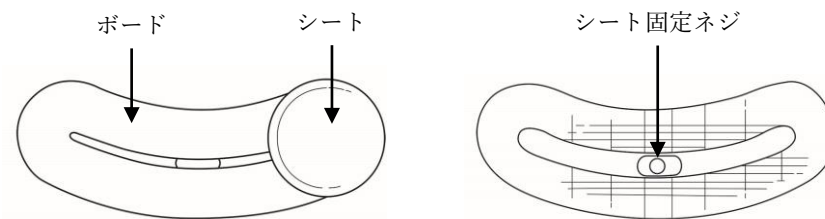

ボードからシートを取り外す場合は、シート固定ネジを緩め外してください。シートをボードに取り付ける際は、シート固定ネジをしっかりと締めてください。

お手入れ

ビージーボードは実質的にメンテナンスフリーですが、必要に応じて頻繁に清掃してください。一般的な洗剤として、ぬるま湯と石鹸とを使用し、乾拭きしてください。

定期的に消毒剤を使用することをお勧めします。ベース背面のトラックガードを取り外し、シートをベースに固定しているナットを緩めることで、簡単に分解して清掃することができます。

【お手入れ上のご注意】

ビージーボードを複数の方が使用する場合、使用後に消毒剤で本体を洗浄することをお勧めします。これらの丈夫な材料は、耐久性のある医療機器の除菌に使用されている洗剤であれば、強度や性能に悪影響を与えることなく洗浄することができます。

老朽化した製品をお持ちの方は、保守部品を使用して製品を再生することをお勧めします。詳しくは当社までご相談ください。

仕様

品番	BG01MWH
サイズ	長さ813mm × 幅254mm × 厚さ(ベース部) 16mm、(シート部) 9.5mm
重量	2.0kg
素材	ミネラル強化ナイロン樹脂
耐荷重	最大180kg